

TOMORROW TODAY

SIGNA™ Artist

Edição AIR™




gehealthcare.com/mr





Um equilíbrio excepcional entre conforto e produtividade

Desenvolvido pensando tanto nos pacientes quanto nos profissionais, o sistema Premium de Ressonância Magnética 1.5T da GE Healthcare, SIGNA™ Artist Edição AIR™, aproveita a tecnologia de aquisição inteligente para proporcionar exames simples e confortáveis para o paciente com ótima qualidade de imagem em menos tempo. O SIGNA™ Artist realiza exames com pé-primeiro e uma cobertura de bobina de 360 graus para acomodar todos os tipos de aquisições e tamanhos de pacientes, ajudando a reduzir tempo do paciente sobre a mesa em 37%. Do planejamento à aquisição, a sua prática clínica será valorizada pela versatilidade do sistema - fornecendo qualidade de imagem consistente, enquanto melhora a produtividade da preparação do exame em 59%.

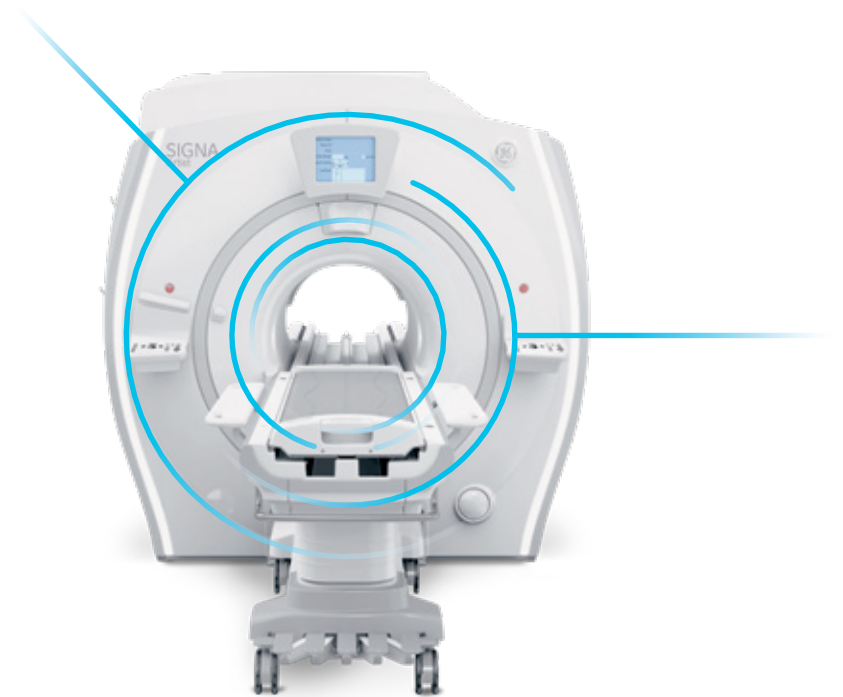

AIR™

Uma experiência em RM simplesmente melhor

A família de produtos AIR™ entrega versatilidade clínica, melhorias de produtividade inteligentes e qualidade de imagem consistentemente superior.



AIR™ Coils



Versatilidade clínica e conforto

Premiado como Melhor Novo Dispositivo de Radiologia em 2019, as bobinas AIR™ são as bases de uma experiência em RM simplesmente melhor. A inovação de engenharia no coração de nossas bobinas AIR™ nos permitiu criar um projeto de bobina revolucionário que é mais leve, oferece mais flexibilidade e maior cobertura preparando o terreno para maior liberdade de posicionamento e uma experiência confortável para o paciente.

- **AIR™ Anterior Array Coil** – Adquira imagens do tórax, abdômen e pelve sem reposicionar a bobina.
- **AIR™ Multi-Purpose Coils*** – Aquisições ortopédicas, de corpo e cardíacas simplificadas nos tamanhos grande e médio.



* Ainda não possui marcação CE. Não está disponível para venda em todas as regiões.

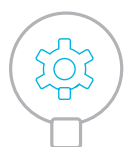
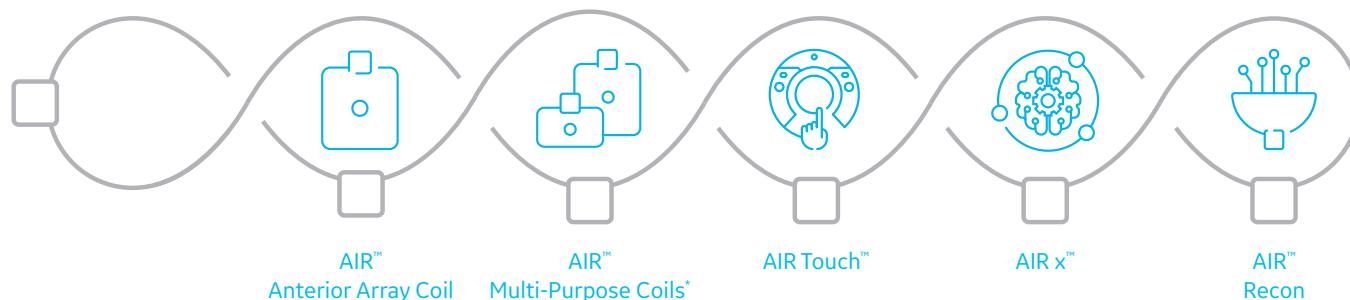


AIR™ Workflow

Melhorias de produtividade inteligentes

Aumente sua produtividade em RM com aplicações de fluxo de trabalho inteligentes desenvolvidas para otimizar suas aquisições. O AIR™ Workflow ajuda a acelerar os tempos de aquisição, aumentar a confiança diagnóstica através dos níveis de habilidade e fornecer resultados consistentemente precisos. Aplicações automatizadas, AIR Touch™ e AIR x™, fazem uma diferença clínica impactante para um fluxo de trabalho simplesmente melhor.

- **AIR Touch™** – Seleção inteligente de bobinas que automaticamente detecta a melhor combinação para cada paciente. Com AIR Touch™ você utiliza de forma simplificada com apenas 1 toque a ferramenta de marcação da GE, IntelliTouch™, para ativar um conjunto otimizado de bobinas que é selecionado com base na anatomia do paciente.
- **AIR x™** – Prescrição de cortes de RM inteligente para exames neurológicos de rotina e desafiadores. Desenvolvido com um algoritmo de *deep-learning* criado a partir de um banco de dados com 36.000 imagens, o AIR x™ detecta a anatomia e prescreve os cortes no cérebro automaticamente.

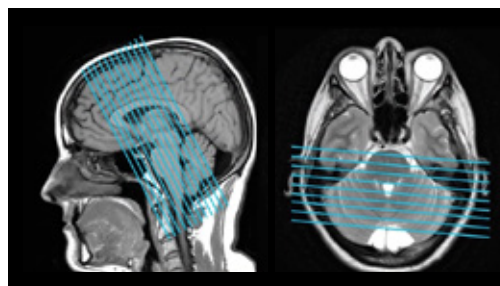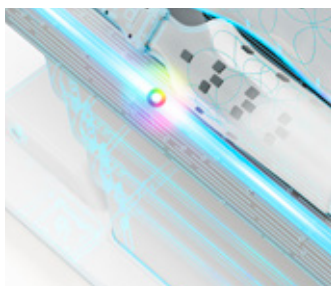


AIR™ Image Quality

Qualidade de imagem consistentemente superior

O AIR™ Image Quality completa a família de produtos AIR™ com um software de reconstrução de imagens que reduz o ruído de fundo e artefatos de fora do FOV. Ajuda a melhorar a relação sinal-ruído em toda a imagem sem ter de sobrecarregar seu protocolo de aquisição.

- **AIR™ Recon** – Cria imagens excepcionais e com qualidade de imagem consistente em tempos de aquisição mais rápidos, o novo padrão para imagens de RM.

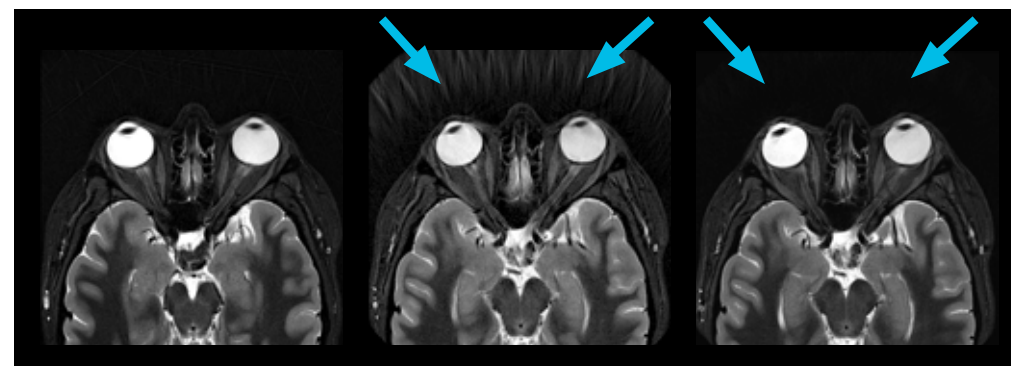

Antes

T2 STIR PROPELLER Axial
0,5 x 0,5 x 2,5 mm
4:33 min
1,7 No Phase Wrap

Antes


T2 STIR PROPELLER Axial
0,5 x 0,5 x 2,5 mm
3:33 min
1,3 No Phase Wrap

Usando SIGNA™ Works Edição AIR™


T2 STIR PROPELLER Axial
0,5 x 0,5 x 2,5 mm
3:33 min
1,3 No Phase Wrap com
AIR™ Recon

AIR™ Anterior Array Coil


Flexibilidade líder de mercado que te permite adquirir tórax, abdômen e pelve sem reposicionar a bobina.

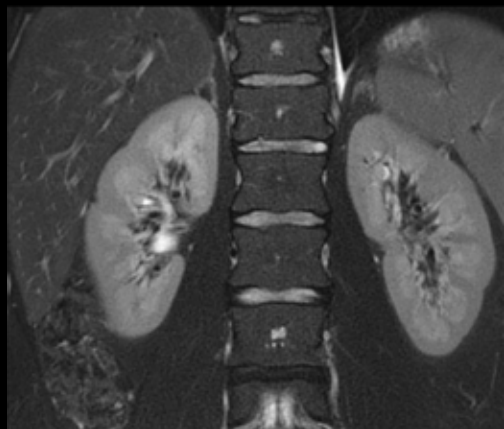


T2 PROPELLER FatSat Coronal
Respiração livre com Auto Navigator
0,8 x 0,8 x 4,0 mm

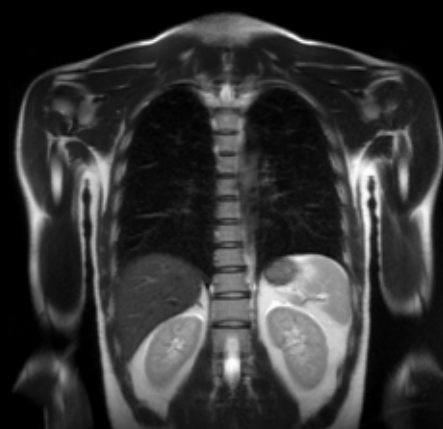

Coronal, FOV de 55 cm, 24 seg.
21ch Head/Neck Unit + 30ch AIR™ Anterior
Array Coil + 40ch Posterior Array

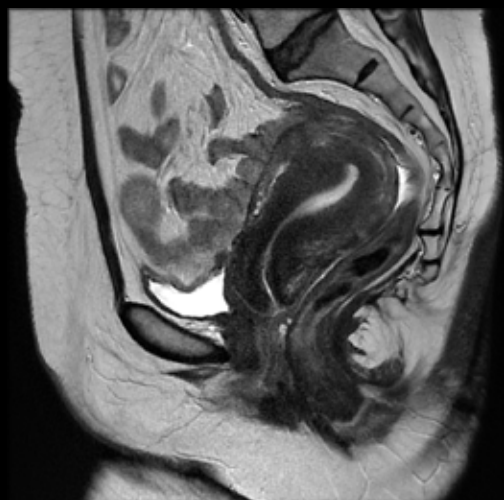

T2 PROPELLER Sagittal
0,7 x 0,7 x 3,5 mm

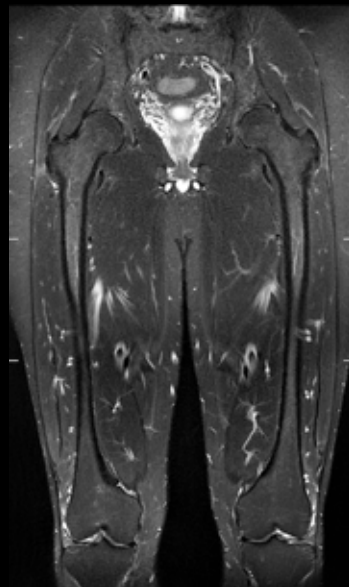


STIR Coronal
FOV de 56 cm
2 estações

AIR™ Multi-Purpose Coils*


Adquira de forma simples orto, corpo e cardio nos tamanhos médio e grande.




DP FatSat Coronal
0,4 x 0,6 x 3 mm

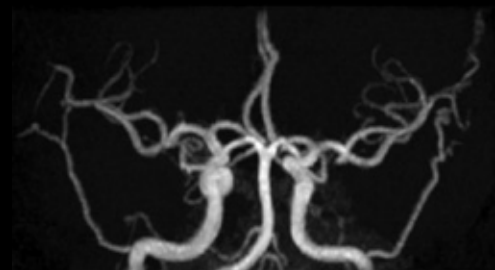


Axial 3D TOF with HyperSense
0,56 x 0,56 x 1 mm
2:47 min.

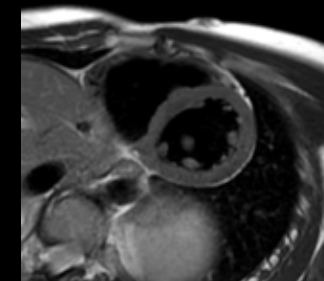

T2 Double IR Eixo Curto
1,2 x 1,4 x 10 mm

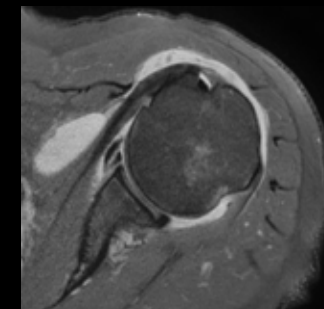

DP FatSat Axial
0,4 x 0,6 x 3 mm

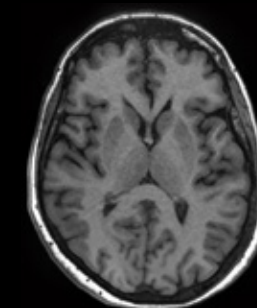

T1 BRAVO 3D Axial
1 x 1 x 1,2 mm
3:19 min.

** Ainda não possui marcação CE. Não está disponível para venda em todas as regiões.*

SIGNATM Works Edição AIRTM

Versatilidade, produtividade e qualidade de imagem excepcionais

Imagine um pacote de softwares que pode te ajudar a fazer mais com menos. Esse é o objetivo do SIGNATMWorks Edição AIRTM, o último lançamento de software da GE, que apresenta tecnologias simplesmente melhores e aprimoramentos ao seu equipamento de RM. Seja simplificando a preparação do exame, acelerando a aquisição de imagem ou melhorando o conforto do paciente, o pacote e inovações AIRTM entrega versatilidade, produtividade e qualidade consistente para todos os clientes.


Adicionalmente, este lançamento traz novas aplicações junto a melhorias para aplicações já existentes com o objetivo de empoderar qualquer tecnólogo a entregar imagens com uma nitidez notável.

NeuroWorks


Esta solução personalizada te permite adquirir imagens do cérebro, coluna e anatomia vascular com contraste de tecido excepcional. Estas técnicas robustas permitem o alinhamento automático com um único clique, fornecendo uma solução de neuro completa da aquisição ao pós-processamento.

Suprima o LCR, a substância branca ou cinzenta para aumentar a visibilidade da lesão com o Cube, nosso conjunto de aquisição de imagens volumétricas 3D.


Preserve o contraste do tecido, tanto em aquisições T1 quanto em T2, enquanto reduz artefatos de movimento com PROPELLER MB.

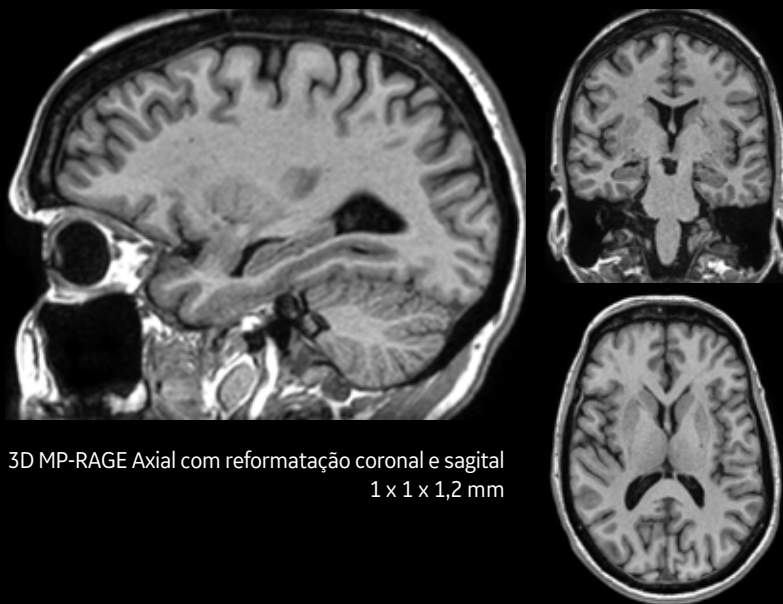


3D MP-RAGE Axial com reformatação coronal e sagital
1 x 1 x 1,2 mm

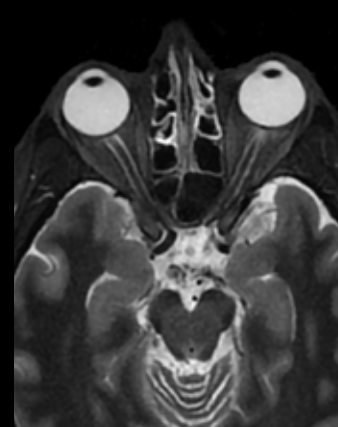

T2 STIR PROPELLER
Axial 0,77 x 0,77 x 2 mm

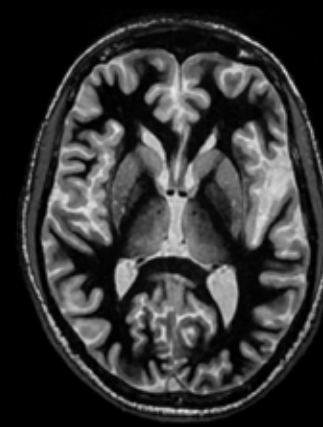

3D BRAVO
Anulação da substância branca

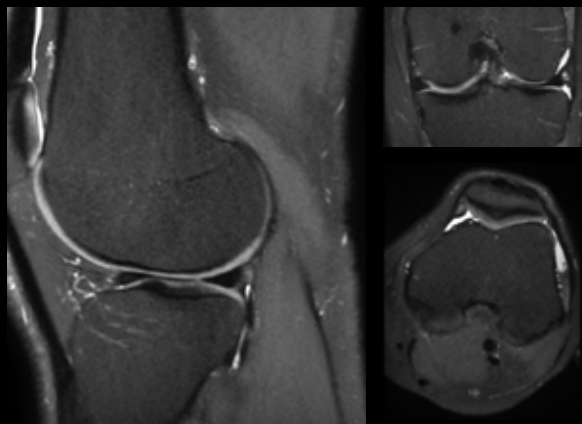

DP FatSat Coronal
0,6 x 0,6 x 0,6 mm
HyperSense* 2 x 2 x 1,5
4:29 min.



PD PROPELLER Coronal
0,4 x 0,4 x 3 mm

OrthoWorks

Esta vasta biblioteca de técnicas de aquisição musculoesqueléticas te permite examinar ossos, juntas e tecidos moles com contraste de tecido excepcional.

Cube, combinado com ASPIR, produz imagens 3D de densidade de prótons com melhor uniformidade de supressão de gordura.

Com uma aquisição 3D e reformatações multiplanares, o Cube pode substituir aquisições 2D individuais.


BodyWorks

Examine a anatomia do corpo inteiro, abdominal e pélvica com velocidade e flexibilidade para se adaptar aos diferentes tipos de pacientes.


Reduza o movimento respiratório para imagens abdominais mais acuradas com Auto Navigator. Essa abordagem de respiração livre é compatível com várias sequências de pulsos, incluindo difusão, PROPELLER MB, MRCP e imagens T1 multifásicas dinâmicas.




T2 SSFSE Coronal
FOV Comprido

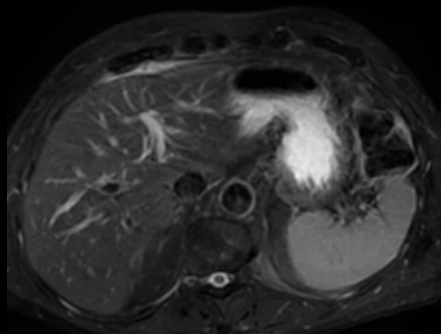

T2 FatSat PROPELLER Axial respiracão livre
com Auto Navigator

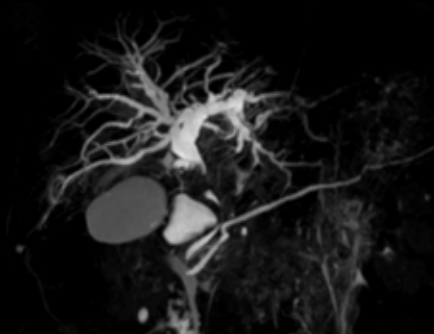

3D MRCP Navigated com HyperSense*
0,9 x 0,9 x 1,8 mm
3:15 min.

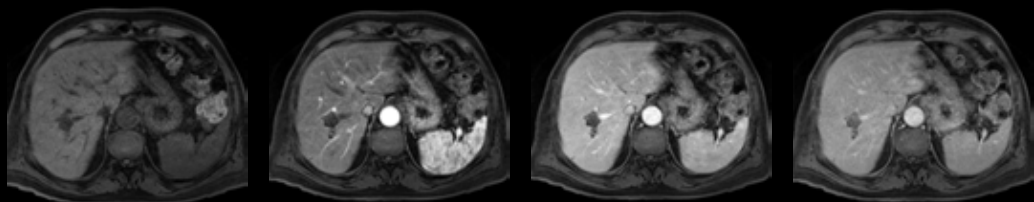


LAVA Axial
Respiração livre com Auto Navigator
1,4 x 2,2 x 4,4 mm


OncoWorks

Este extenso conjunto de técnicas adquire dados anatômicos para permitir uma avaliação oncológica singular da anatomia. O OncoWorks inclui técnicas de difusão, imagens com contraste de tecido robusto, sem sensibilidade ao movimento, com alta resolução temporal e espacial.


Imagens volumétricas 3D com supressão de gordura adiabática otimizada, combinada com ARC ou ASSET, fornece alta resolução espacial e temporal e captura padrões de contraste.

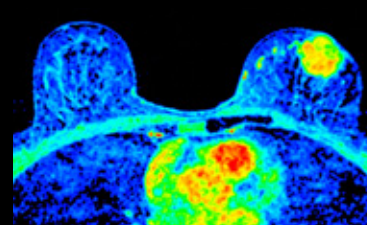


T1 Axial Contraste Dinâmico
Positive Enhancement
Integral Map

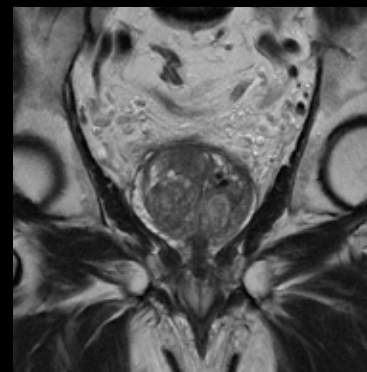


T2 PROPELLER Coronal
0,6 x 0,6 x 4 mm
FOV pequeno e correção de movimento

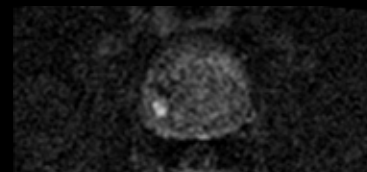

DWI FOCUS* - b1000

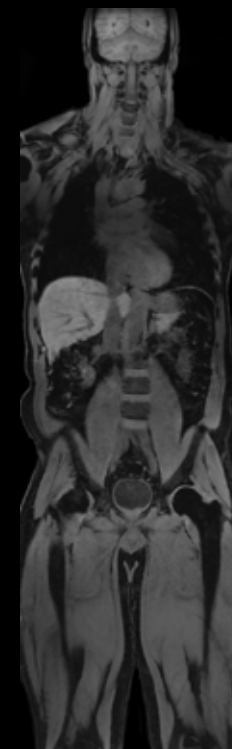

Corpo inteiro
LAVA Flex T1 Coronal
imagem de água

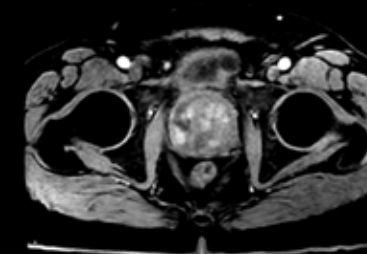

DISCO* Flex 3D


* opcional

CVWorks


Técnicas cardíacas intuitivas que se adaptam a diferentes tipos de pacientes. Avalie a morfologia, fluxo, função e viabilidade do tecido para obter insights cruciais sobre a estrutura vascular e dinâmica do fluxo.

Múltiplas apneias se tornam desnecessárias com as técnicas Single Shot MDE e Black Blood, que oferecem alternativas amigáveis ao paciente.


Com nossos protocolos QuickStep que simplificam o fluxo de trabalho, a aquisição de imagens da vasculatura do corpo inteiro pode ser feita em menos de 6 minutos. Gradientes de alta performance permitem alto contraste do tecido do miocárdio com FIESTA Cine com alta resolução espacial e temporal.

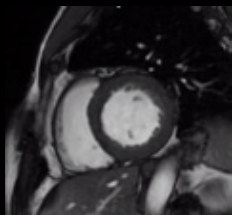


Eixo curto 2D
FIESTA Cine

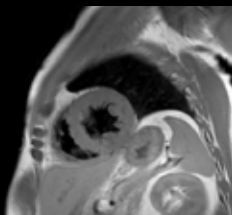

Black Blood T1

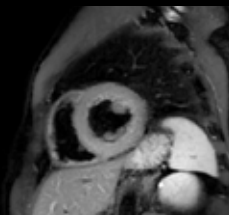


Black Blood SSFSE T2
ASPIR

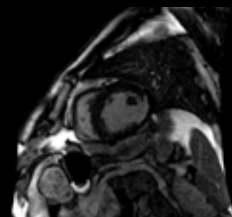


PSIR Single Shot MDE




PS MDE

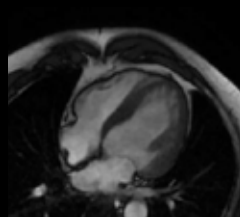


4ch FIESTA Cine

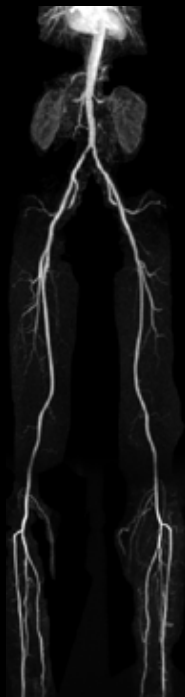

QuickStep MRA

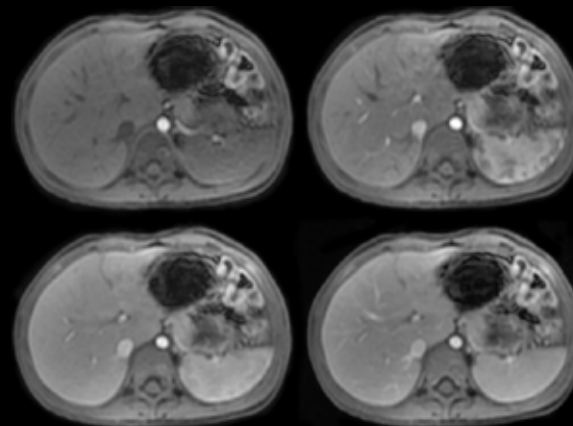

Turbo LAVA com
Respiração Livre Auto
Navigator Fígado Dinâmico
1,2 x 1,7 x 2,6 mm
25 seg / fase

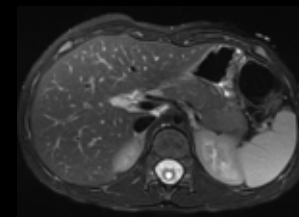

T2 FatSat Axial
FOV 24
0,9 x 1,1 x 5 mm



T2 frFSE Sagittal Pasted

PaedWorks

Protocolos especializados para atender de maneira simples às necessidades dos seus menores e mais frágeis pacientes. PROPELLER pode ser combinado com Auto Navigator e difusão para exames de respiração livre.

No que diz respeito ao coração, o Single Shot MDE fornece resultados mais rápidos e confiáveis.

As imagens acima à esquerda demonstram aquisições T1 dinâmicas com Auto Navigator, que permite ao paciente respirar livremente enquanto captura fases dinâmicas. A avaliação completa da coluna pode ser obtida forma simples com aquisições de rotina T2 frFSE.

Expanda suas áreas de especialidade

Leve seus conhecimentos a um próximo nível indo além do padrão com as aplicações inovadores do SIGNA™Works. Melhor qualidade de imagem, maior eficiência e um fluxo de trabalho mais simplificado ajudam você a ter um desempenho melhor do que nunca.

HyperWorks*

HyperWorks significa hiper digitalização com imagens surpreendentes e velocidade impressionante. Melhore a qualidade da imagem, a eficiência e o fluxo de trabalho com aplicações inovadores, incluindo HyperSense e HyperBand para aceleração e HyperCube para imagens 3D.

O HyperMAVRIC SL* ajusta automaticamente a aquisição ao implante do paciente. Quando usado com o MAVRIC SL, o HyperMAVRIC SL pode permitir tempos de aquisição 40% mais curtos e, em uma aquisição 3D, pode fornecer resolução isotrópica que leva a uma melhor conspicuidade da lesão.¹

ViosWorks*

O ViosWorks aproveita o *deep learning* e o poder analítico da plataforma de imagem *cloud based Arterys™* para visualizar e quantificar com precisão o fluxo cardíaco em uma única aquisição de respiração livre.

SilentWorks*

Elimine virtualmente o ruído acústico da RM em todas as anatomias sem comprometer a qualidade da imagem com o SilentScan.

ImageWorks*

Aumente seu desempenho geral de RM com as aplicações ImageWorks. Entregue múltiplos contrastes em uma única aquisição com MAGiC, reduzindo o tempo de *scan* em até 50% quando comparado com a aquisição de todos os contrastes separadamente.

MUSE*

O MUSE reduz as distorções induzidas por borramento e suscetibilidade em comparação com as técnicas convencionais de geração de imagens paralelas, enquanto ultrapassa os limites da resolução espacial para geração de imagens DWI / DTI.

PROGRES*


Melhore ainda mais a qualidade da imagem de difusão com a correção de distorção do PROGRES. O PROGRES limpa artefatos de distorção indesejados em Imagens DWI / DTI, além de permitir até 300 direções de tensores de difusão.

* Opcional.


HyperWorks*

HyperCube

Reduza significativamente os tempos de aquisição e minimize artefatos de movimento e dobramento com os recursos expandidos de imagem 3D do HyperCube.

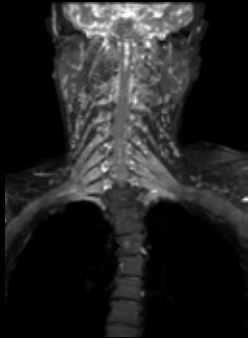


T2 HyperCube Flex Coronal
Plexo Braquial
Imagem de água – MIP
1,2 x 1,2 x 1,4 mm
3:49 min.

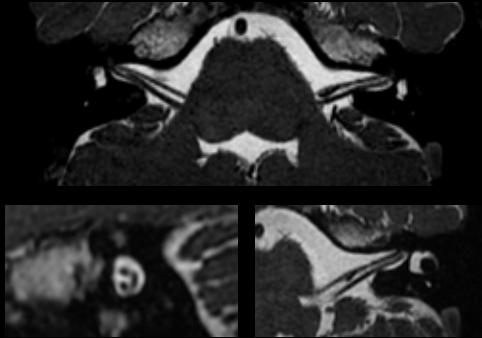


Axial T2 HyperCube IAC with HyperSense
0,6 x 0,6 x 0,8 mm
3:26 min.

HyperSense

Reduza o tempo total da aquisição sem comprometer a qualidade da imagem com HyperSense, que pode ser usado em 88% de todos os procedimentos clínicos.

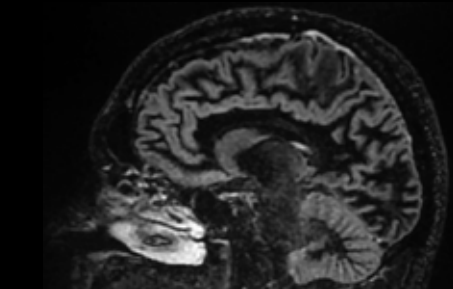


3D Cube DIR Sagital
com HyperSense
1,3 x 1,3 x 1,4 mm
4:02 min.

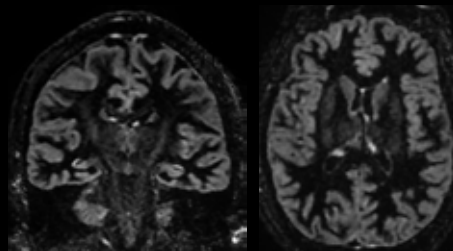


HyperBand


O HyperBand leva sua difusão para um novo nível, permitindo que você adquira mais cortes ou mais direções de difusão em uma aquisição típica.

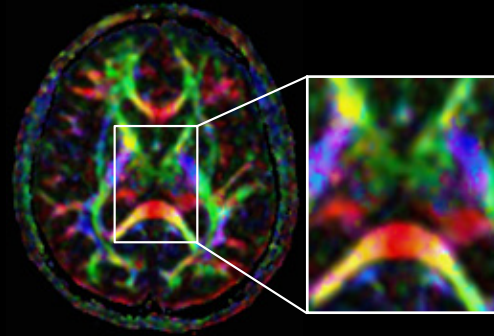


HyperBand mapa de orientação colorido

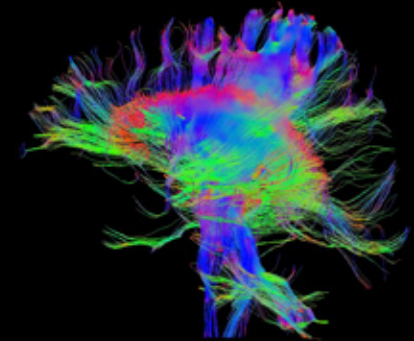

HyperBand DTI

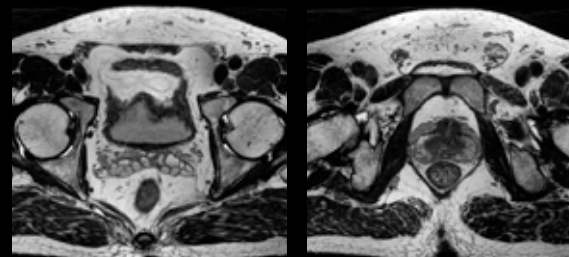


HyperCube T2 com HyperSense
0,7 x 0,7 x 0,7 mm
3:58 min.

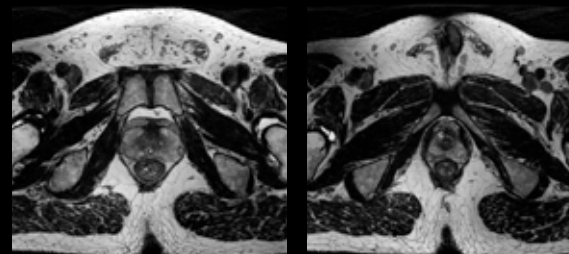


3D TOF COW Axial
com HyperSense
0,7 x 0,8 x 1,0 mm
2:38 min.

HyperMAVRIC SL

O MAVRIC SL agora traz ponderação T2, Flexible No Phase Wrap e uma configuração automatizada de parâmetros para um fluxo de trabalho otimizado na interface o usuário.

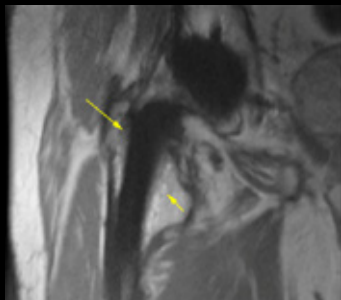

MAVRIC SL PD
0,4 x 0,6 x 4 mm

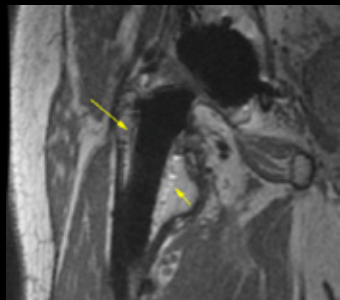


HyperMAVRIC SL PD
1,3 mm isotrópico

Formação de membrana fibrosa no fêmur que não foi observada em uma aquisição convencional ou no mesmo tempo de aquisição.

ViosWorks*


Conclua um exame funcional do coração inteiro em uma aquisição sem apneia. O ViosWorks 4D Flow acelera a aquisição usando a reconstrução HyperKat para capturar informações clínicas de rotina e auxiliar na geração de imagens de anatomias complexas.

O ViosWorks 4D Flow ajuda você a obter informações funcionais cine, juntamente com a velocidade e direção do fluxo.

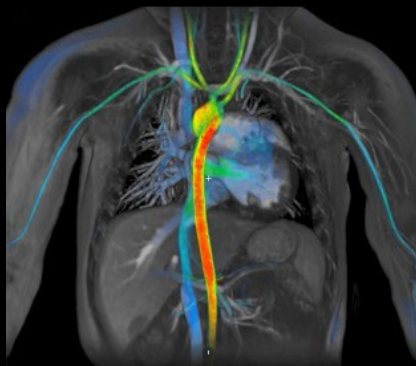


SilentWorks*

O SilentWorks está disponível em todas as anatomias e pode ser utilizado com várias bobinas e ponderações, incluindo DWI. E com novos aprimoramentos, como o 3D Silenz e o PROPELLER MB, o tempo de seu exame é reduzido sem comprometer o desempenho..

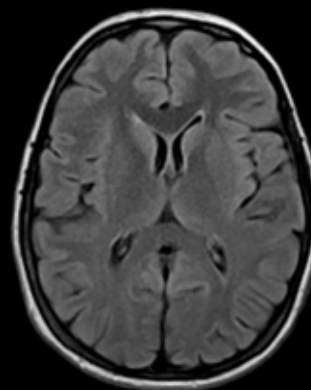


T2 FLAIR Axial
Silent PROPELLER <11 dB
0,9 x 0,9 x 5 mm

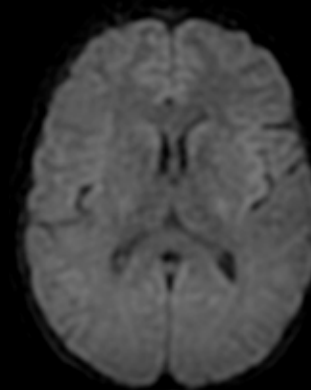


DWI Axial
Silent PROPELLER <11 dB
2,1 x 2,1 x 5 mm




T2 PROPELLER FatSat
Coronal com SilentScan

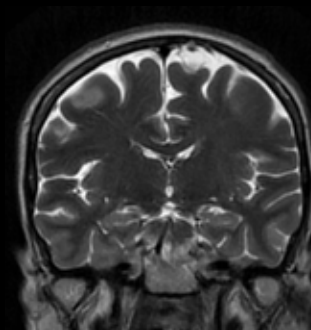

T2 Coronal
Silent PROPELLER <11 dB
0,8 x 0,8 x 4 mm

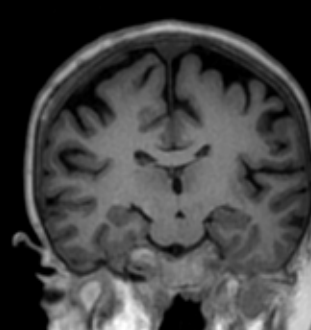

Reformatação Coronal
(T1 Silenz Sagital <3 dB)
1,2 x 1,2 x 1,2 mm

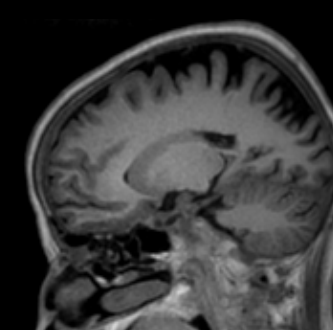


T1 Silenz Sagital <3 dB
1,2 x 1,2 x 1,2 mm

ImageWorks*

MAGiC


O segredo do MAGiC reside em sua capacidade única de oferecer vários contrastes de imagem em uma única aquisição de neuro. O MAGiC oferece maior flexibilidade clínica, liberando tempo para sequências avançadas. O MAGiC vai além da rotina, fornecendo dados paramétricos complementares para uma imagem mais completa. O contraste da imagem pode ser alterado aplicando ajustes simples após a aquisição.

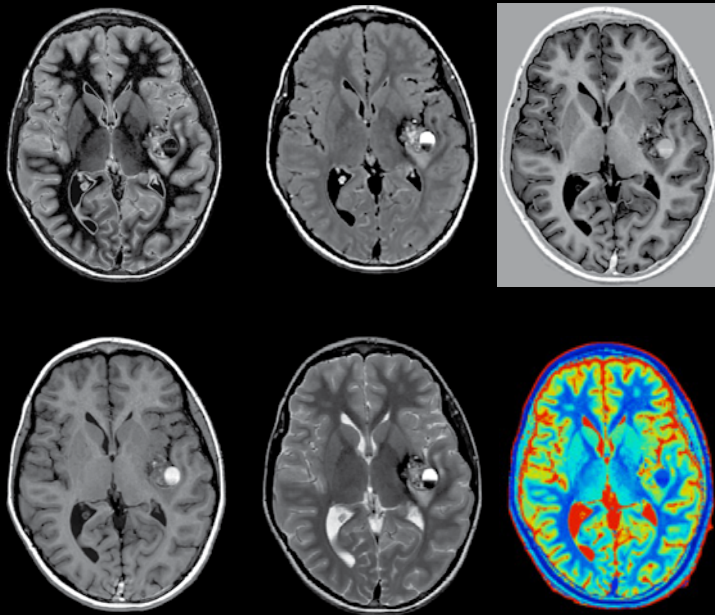

DIR, FLAIR, PSIR (acima), T2, T1 e mapa T2 (abaixo) foram adquiridos em um *scan*.


Recomenda-se adquirir imagens T2 FLAIR convencionais além do MAGiC.

* Opcional.

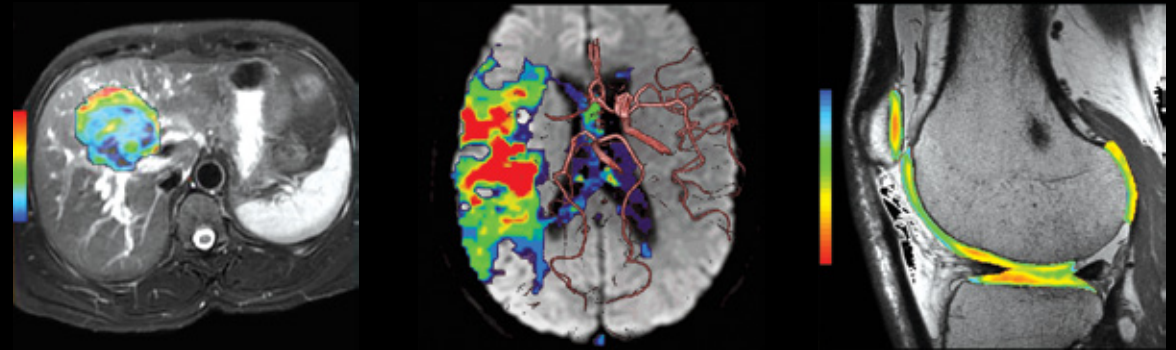

READYView

O READYView ajuda a simplificar exames complexos, fornecendo uma plataforma de visualização que fornece acesso a tecnologias avançadas de pós-processamento. Estando disponível diretamente no console do operador de RM, o READYView acelera o fluxo de trabalho e a prontidão da leitura, eliminando as etapas demoradas do pós-processamento.

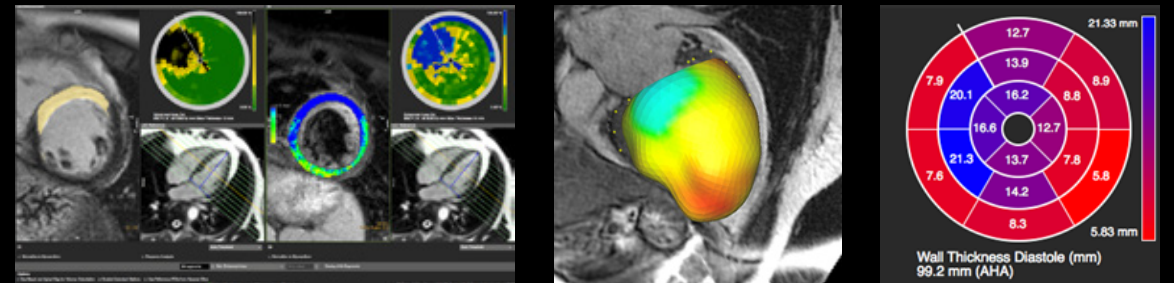

cvi42®


cvi42® é uma solução abrangente de pós-processamento cardiovascular baseada *deep learning* que usa algoritmos automatizados para caracterizar tecidos, gerar mapas e avaliar fluxo e função.

Quantib™ Brain

O Quantib™ Brain é um software de processamento de imagens médicas que utiliza *machine learning* destinado a rotulagem automática, visualização e quantificação volumétrica de estruturas cerebrais segmentáveis a partir de um conjunto de imagens de RM.

Os resultados do Quantib™ Brain consistem em segmentações, visualizações e medições de volume de massa cinzenta, substância branca e líquido cefalorraquidiano. A aplicação também visualiza e quantifica candidatos à hiperintensidade da substância branca (WMH).

A função de segmentação WMH Quantib™ Brain pode executar uma análise longitudinal de WMHs validados para comparação de vários exames de um paciente individual.

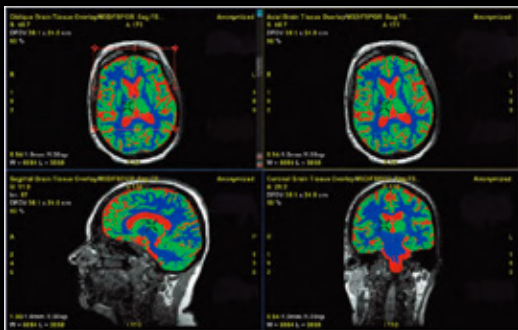


MUSE*


O MUSE fornece imagens DWI / DTI mais nítidas, reduzindo as distorções induzidas pelo borramento e pela suscetibilidade, em comparação com as técnicas convencionais de geração de imagens paralelas. Use o MUSE em áreas vulneráveis a artefatos de suscetibilidade, como cérebro e próstata.



MUSE DWI Coronal

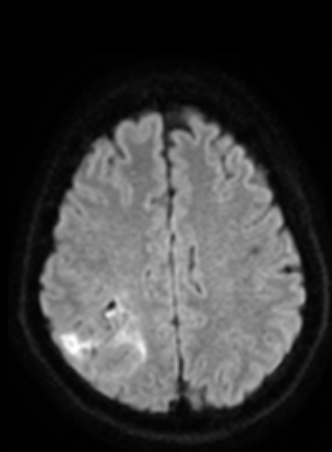


MUSE DWI Axial b1000

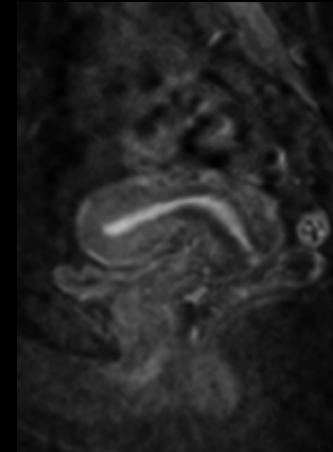


MUSE DWI Sagittal b800

PROGRES*


O PROGRES, que inclui a correção de distorção, trata as distorções nas aquisições de difusão que normalmente surgem da falta de homogeneidade B_0 e da leitura EPI, mas também podem ocorrer com menos frequência devido a imperfeições relacionadas a movimentos e aos gradientes, como *eddy currents*.

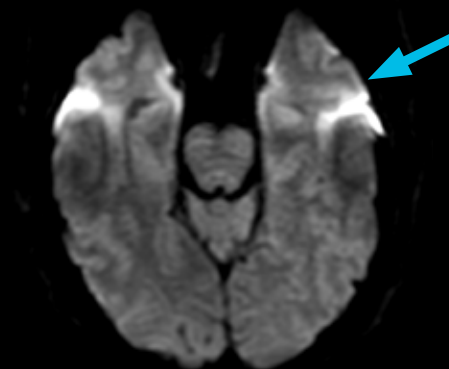

EPI DWI sem PROGRES

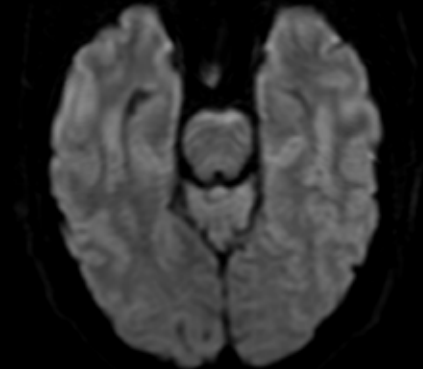

EPI DWI com PROGRES

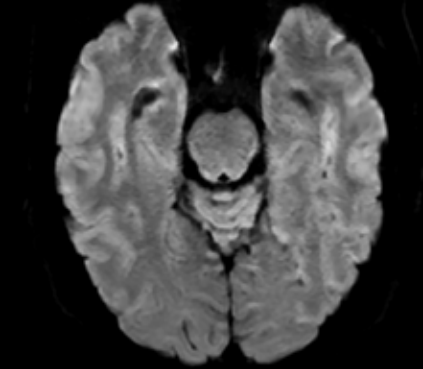

MUSE DWI com PROGRES

* Opcional.



Tecnologia de RM que fortalece o seu desempenho

Desenvolvido para ultrapassar barreiras, a plataforma avançada do SIGNA™ Artist Edição AIR™ o torna o sistema 1.5T da GE mais versátil, adaptável e poderoso.


Agora, exames com os pés-primeiro e aquisições de corpo inteiro ficaram fáceis. Dinâmico, mas perspicaz, o SIGNA™ Artist é uma Ressonância Magnética construída para trabalhar para você.

Total Digital Imaging (TDI)


O SIGNA™ Artist Edição AIR™ oferece avanços de imagem surpreendentes com TDI.

A poderosa infraestrutura TDI suporta o uso das bobinas AIR™, redefinindo a excelência clínica com imagens consistentes e de alta qualidade.


- **Total Digital Imaging (TDI)** emprega um conversor analógico-digital independente para digitalizar as entradas de cada um dos até 128 canais de RF, eliminando melhorias desnecessárias de ruído. Em outras palavras, todo elemento se traduz em um sinal digitalizado.
- Desenvolvido para maior SNR e uniformidade - SNR até 25% maior.
- **AIR™ Coils**, combinado com o TDI, permite incomparáveis 88 canais em um único FOV para maximizar a imagem paralela, a resolução e o tempo de aquisição.

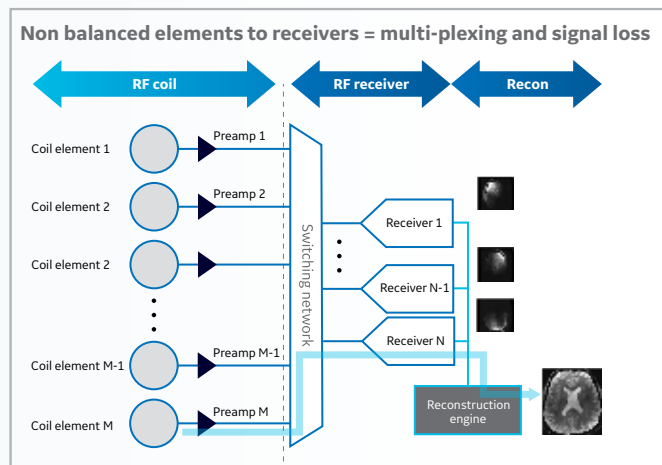


RM Convencional

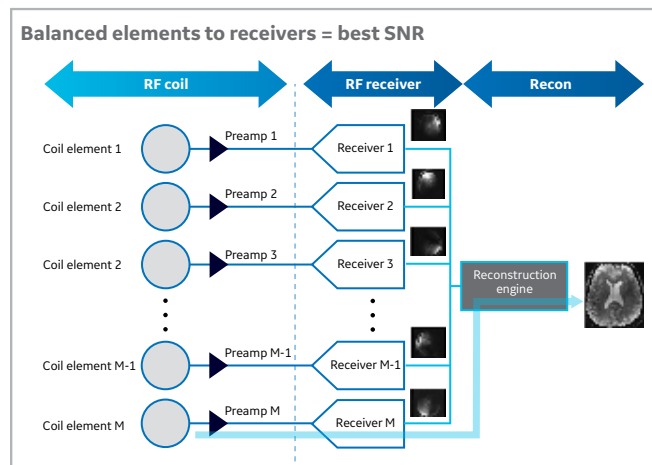

SIGNA™ Artist Edição AIR™ com TDI

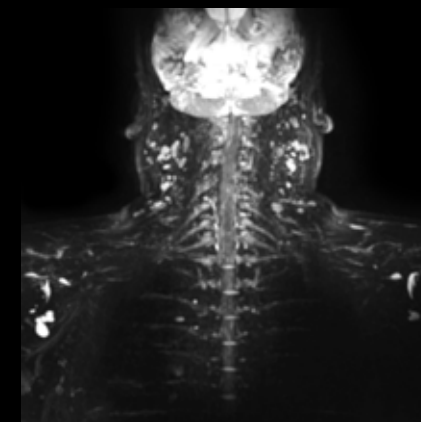

T2 STIR Coronal HyperSense e HyperCube
3x fase + 1,3x Aceleração HyperSense
1,8 x 1,8 x 1,4 mm

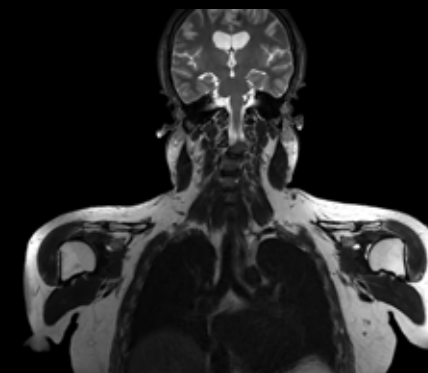

88 canais dentro do FOV
19ch Head/Neck Unit +
(2) 30ch AIR™ Anterior Array Coils +
40ch Posterior Array



Mantemos à sua disposição opções de atualização

O Get The Works oferece o poder de escolha para você atualizar apenas seu software, software e hardware ou para um sistema completamente novo, construído em torno do seu magneto já existente. Dependendo do modelo de RM que você possui, pode haver algumas opções para você. Com o Get The Works, de forma simples tudo se resume em fazer a decisão certa de atualização para o equipamento da sua organização.

- **Uma fração do custo** – Economia de até 50% em custos de construção vs. uma nova instalação do sistema[†]
- **Minimizar o tempo de inatividade** – A atualização pode ser concluída em apenas 4-5 dias, reduzindo o tempo de instalação em até 60%[†]

[†] Resultados podem variar

Você nunca deve se comprometer entre conforto do paciente e sua produtividade

E com tecnologias de aquisição com inteligência artificial (IA), como AIR x™, cvi42® e Quantib Brain, o seu SIGNA™ Artist traz para você o melhor dos dois mundos. Experimente o equilíbrio magistral dos exames confortáveis ao paciente com a melhor qualidade de imagem em menos tempo.



Máximo conforto e versatilidade

- 360 graus de cobertura da bobina, se ajustando a todos os tipos de exames e tamanhos de pacientes
- A opção de exames com os pés-primeiro reduz a taxa de rejeição por claustrofobia em 90%[‡]
- A Mesa acoplável eXpress é leve e facilita a remoção rápida e um fluxo de trabalho melhor na preparação do paciente
- Respiração livre para qualquer exame, incluindo estudos dinâmicos, bem como técnicas de correção de movimento sem utilização de agulhas compatíveis com 2D / 3D



Qualidade de imagem consistente

- 80% dos casos têm a qualidade de imagem melhorada sem tempo adicional com o AIR™ Recon
- Aproveite o maior número de canais do seu FOV para aumentar a qualidade de imagem e a produtividade



Precisão e rapidez

- 59% de ganho de produtividade na configuração dos exames e 37% de redução no tempo do paciente sobre a mesa com AIR Touch™[‡]
- Tempo de configuração 5x mais rápido e 4x menos cliques no mouse com o AIR x™[‡]

O SIGNA™ Artist Edição AIR™ é outra maneira pela qual a GE Healthcare está trazendo para você a RM de amanhã, hoje.

[‡] Resultados podem variar.



Para mais informações, visite gehealthcare.com/mr ou entre em contato com o seu Representante de vendas da GE Healthcare.

A GE Healthcare é uma líder global em tecnologias médicas e soluções digitais inovadoras. A GE Healthcare permite que os médicos tomem decisões mais rápidas e embasadas por meio de dispositivos inteligentes, análise de dados, aplicações e serviços, apoiados pela plataforma de inteligência da Edison. Com mais de 100 anos de experiência no setor de saúde e cerca de 50.000 funcionários em todo o mundo, a empresa opera no centro de um ecossistema trabalhando em prol da medicina de precisão, digitalizando a assistência à saúde, ajudando a impulsionar a produtividade e melhorar os resultados para pacientes, provedores, sistemas de saúde e pesquisadores em todo o mundo. Siga-nos no Facebook, LinkedIn, Twitter e Insights, ou visite nosso site www.gehealthcare.com para obter mais informações.

1 Zochowski, K., Miranda, M., Cheung, J., Argentieri, E., Lin, B., Kaushik, S., Burge, A., Potter, H. and Koff, M., 2019. MRI of Hip Arthroplasties: Comparison of Isotropic Multiacquisition Variable-Resonance Image Combination Selective (MAVRIC SL) Acquisitions With a Conventional MAVRIC SL Acquisition. *American Journal of Roentgenology*, 213(6), pp.W277-W286.

2 Dewey, M., Schink, T. and Dewey, C., 2007. Claustrophobia during magnetic resonance imaging: Cohort study in over 55,000 patients. *Journal of Magnetic Resonance Imaging*, 26(5), pp.1322-1327.

© 2020 General Electric Company – Todos os direitos reservados.

A GE Healthcare se reserva o direito de fazer alterações nas especificações e recursos mostrados aqui, ou descontinuar o produto descrito a qualquer momento, sem aviso ou obrigação. Entre em contato com seu representante da GE Healthcare para obter as informações mais recentes. GE, o monograma da GE, SIGNA, AIR, AIR Touch e AIR x são marcas comerciais da General Electric Company.

GE Healthcare, uma divisão da General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., fazendo negócios como GE Healthcare.

Os produtos/tecnologias mencionados nesse material podem estar sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.

Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado.