



CARESCAPE™ R860

Ventilador

Software Versão 11 (V11)

O que teremos neste lançamento?

O sistema CARESCAPE R860 é um ventilador de UTI que apresenta ferramentas especializadas para desmame e ventilação de proteção pulmonar em uma interface de usuário inovadora.

O objetivo deste documento é fornecer uma visão geral dos novos recursos e aprimoramentos no software CARESCAPE R860 V11



Terapia de O2 de Alto Fluxo

Um modo opcional para Terapia de O2 de Alto Fluxo está disponível com o software CARESCAPE R860 V11. O modo funciona com circuitos respiratórios membro duplo e de membro único. Um gráfico de barras de pressão do circuito indica potenciais oclusões. As linhas de tendência para taxa de fluxo e FiO2 estão disponíveis para monitorar o progresso do paciente.



Modos com controle de volume


Selecione um padrão de fluxo inspiratório para ventilação em modos com controle de volume

Fluxo desacelerado: fornece o nível mais alto de fluxo no início da respiração.

Fluxo Dual: responde a uma respiração espontânea do paciente e aumenta o volume fornecido se necessário.

Fluxo constante: fornece um volume fixo “verdadeiro”, não responde à respiração espontânea do paciente.

Nota: Isso pode estar oculto no menu SuperUser e todas as respirações com controle de volume usarão o padrão de Fluxo adaptativo

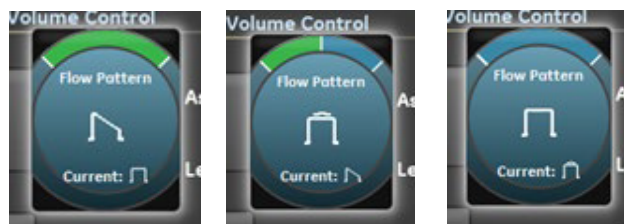

Desacelerado

Dual

Constante

Modo Neonatal

- nCPAP: taxa de frequência respiratória máxima aumentada de 30 para 60 rpm
- Terapia de O2 de alto fluxo: taxa de fluxo é de 2 L / min a 12 L / min

CyberSecurity

Em versões anteriores do software CARESCAPE R860, havia uma senha fixa. Para lidar com possíveis questões de segurança cibernética, os usuários podem modificar sua senha no software CARESCAPE R860 V11. Os usuários agora podem modificar sua senha no software CARESCAPE R860 V11, com opções para definir o tamanho da senha, o número de caracteres alfanuméricos e a frequência das atualizações.

Aprimoramentos de verificação

A válvula de exalação agora é calibrada em cada verificação do sistema. Isso ajuda a eliminar quaisquer problemas que possam surgir se a válvula de exalação não for calibrada pelo usuário.